

Handhabung - 1stQ Hydrophobe Preloaded IOL

Kurzanleitung für IOL mit Z- und B-Haptik, diverse Optiken

Die Ladeschritte sind auf dem Injektor mit den Nummern 1-4 gekennzeichnet.

1.

Führen Sie die Viskoelastikum-Kanüle vollständig


in die kleine Öffnung auf der rechten Seite des Injektors ein, die mit „1“ gekennzeichnet ist.

Stellen Sie sicher, dass die Kanüle vollständig in den blauen Trichter eingeführt ist.


Injizieren Sie das Viskoelastikum langsam und kontrolliert, bis die IOL-Haptiken bedeckt sind.

Die empfohlene **Visko-Menge beträgt 0,2-0,25 ml.**

Überprüfen Sie die Position der Linse in der Kartusche und stellen Sie sicher, dass sie innerhalb der Kartuschenränder liegt.

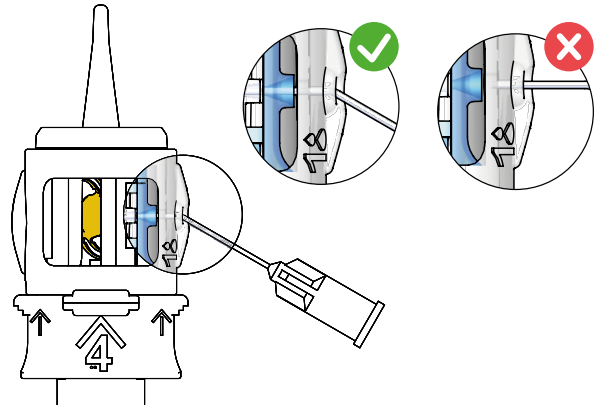


2.

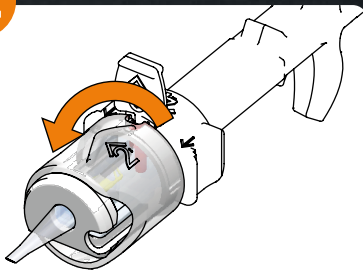


Drehen Sie den mit „2“ gekennzeichneten transparenten Ring um 90°, bis Sie ein „Klick“ hören. Die Kartusche ist nun geschlossen.

3.

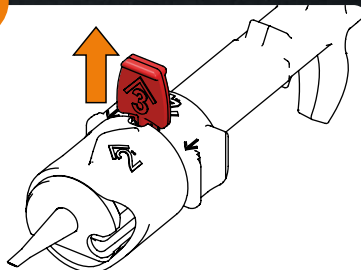


Entfernen Sie den roten Stöper, der mit „3“ gekennzeichnet ist.

4.

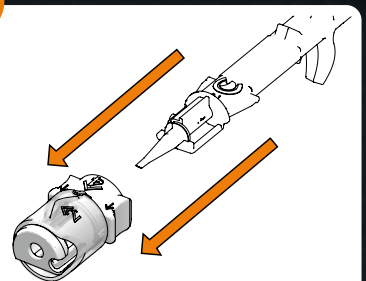

Ziehen Sie den mit „4“ gekennzeichneten Adapter nach vorne ab.


5.

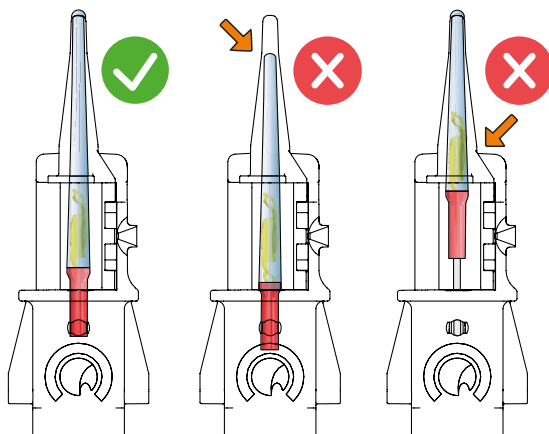

Um die Beschichtung in der Kartuschenspitze zu aktivieren, schieben Sie den Kolben einige Millimeter vor, bis das **Viskoelastikum die Spitze der Kartusche vollständig erreicht**, und warten Sie 30 Sekunden.

Stellen Sie sicher, dass die IOL während dieser Zeit in der Kartusche verbleibt, und schieben Sie die IOL während des Wartens **nicht** in die Spitze vor. Falls erforderlich, füllen Sie etwas Viskoelastikum durch die Spitze nach.

6.

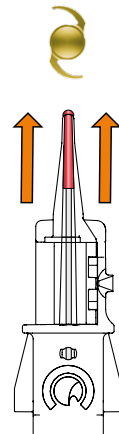

Jetzt ist alles für die Injektion bereit. Schieben Sie den Kolben **langsam und kontrolliert kontinuierlich nach vorne** und **unterbrechen Sie den Vorgang nicht**, bis die IOL aus der Injektorspitze austritt.