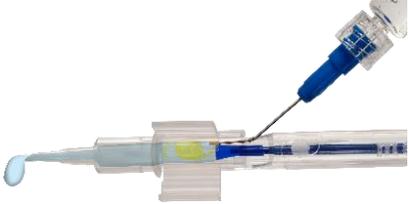
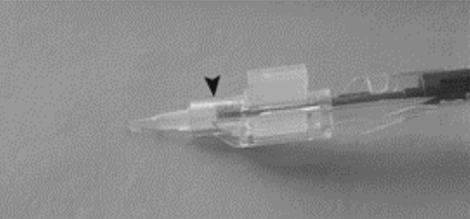
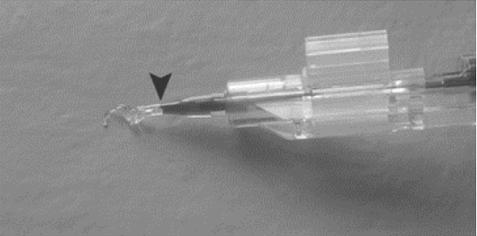


1stQ Basis V IOL hydrophob preloaded – Kurzanleitung

B5AB00, B5ABY0, B5TBY0

<p>①</p> 	<p>Befeuchten Sie die Kartusche und platzieren Sie die BSS-Kanülenspitze neben dem blauen Silikonstempel unter der Linse. Tragen Sie eine großzügige Menge an sterilem BSS auf, bis die Flüssigkeit die Spitze der Kartusche erreicht.</p>
<p>②</p> 	<p>Setzen Sie die Viskokanüle gefüllt mit Hyaluron oder HPMC in die Vorderseite der Injektorspitze ein und füllen Sie die gesamte Kartuschenspitze mit dem Visko.</p>
<p>③</p> 	<p>Injizieren Sie BSS oder eine sehr kleine Menge Visko unter die Optik der Linse. Setzen Sie hierzu die Kanüle vorsichtig unter die Linse in der Ladekammer neben dem Stempel.</p>
<p>④</p> 	<p>Ist der Chirurg bereit die Linse zu injizieren, schließen Sie die Kartuschenflügel bis diese hörbar einrasten. Drehen Sie den Injektor gegen den Uhrzeigersinn um 90°.</p>
<p>⑤</p> 	<p>Der Operateur injiziert die Linse vorsichtig in den Kapselsack. Sollte eine Pause während der Injektion erforderlich sein, muss darauf geachtet werden, dass die Position der Linse maximal in der Mitte des Kartuschen-Laufes liegt.</p>

ACHTUNG

	<p>Verwenden Sie nicht die beiden vorhandenen Löcher am Objektivdeckel für das Einbringen von Visko!!</p>
	<p>Nicht am Ende der Kartuschenspitze pausieren! Dies könnte die Linse in der Spitze blockieren und eventuelle Probleme bei der Injektion hervorrufen.</p>