




Einlegen der Basis Z IOL in das Kartuschen-System

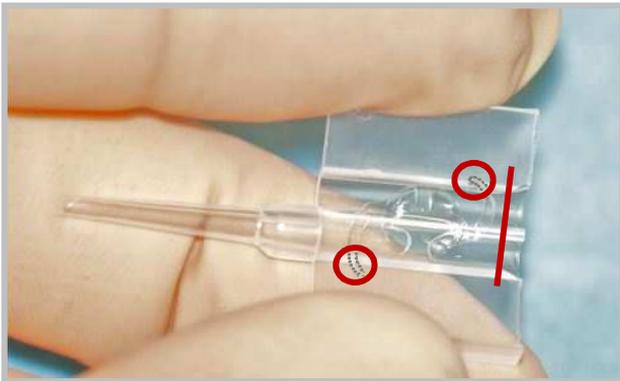


Die Kartusche ist weit geöffnet. Die Basis Z IOL leicht gegen den Uhrzeigersinn gedreht in die Kartusche einlegen. Die Enden der Haptiken liegen auf den Flügeln der Kartusche auf. (o) Wichtig ist es, dass der „Trichter“ am Kartuschen Ausgang frei bleibt. (l)

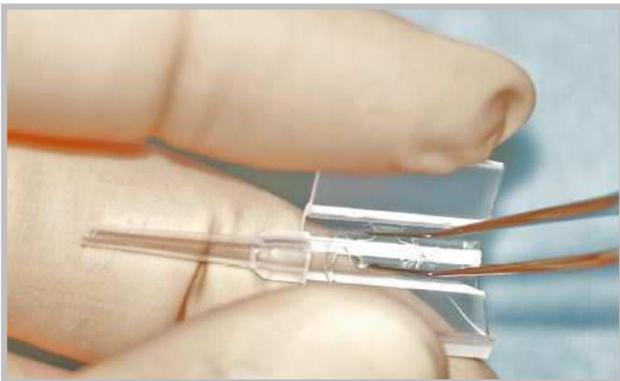

Zunächst wird nur die Optik der IOL in Position gebracht. Dafür die Optik leicht mit der Pinzette nach unten drücken und dabei die Kartusche schließen, so dass die Flügel noch etwa in einem 45° Winkel geöffnet sind.

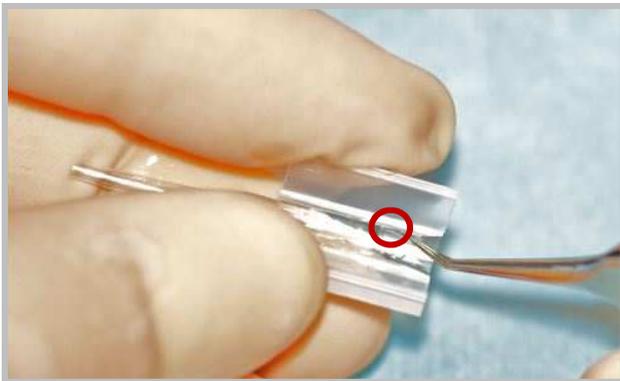

Jetzt erst werden die hintere und die vordere Haptik mit der Pinzette unter die Haltekanten gelegt. Die Enden der Haptiken sollen jeweils zur Optik zeigen. (o)

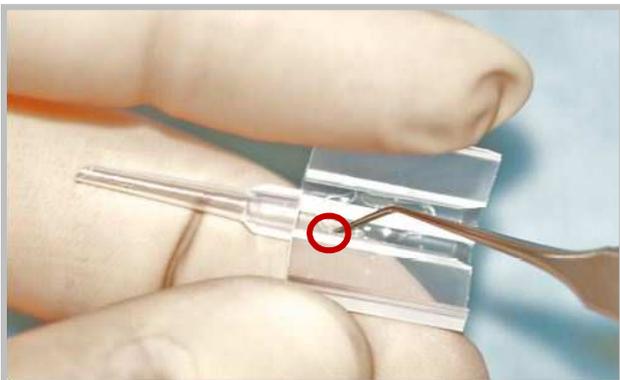

Nun wird die Kartusche geschlossen. Danach wird Viscoelastikum in die Kartusche gefüllt.